

Melagyn®

Solución vaginal

Composición

0,60 g de hidroxietilcelulosa, 0,20 g de ácido láctico, 2,00 g de glicerol, 0,15 g de cloruro potásico, 0,10 g de edetato sódico, 0,10 g de clorhidrato de polihexametilenbiguanida (PHMB), agua purificada c.s.p. 100 ml.

Categoría Producto Sanitario

Propiedades

El uso de **Melagyn® Solución vaginal** favorece el restablecimiento de las funciones fisiológicas normales incluso durante tratamientos traumáticos como los farmacológicos o físicos. El uso de **Melagyn® Solución vaginal** durante los tratamientos de las infecciones vaginales o después de tratamientos físicos ayuda a restablecer las condiciones fisiológicas normales de la vagina. El producto está protegido con polihexanida (PHMB), un surfactante catiónico de alta tolerabilidad en todas las mucosas.

Indicaciones


Tratamiento de vulvovaginitis y cervicovaginitis de cualquier origen y naturaleza, restaura y mantiene las condiciones fisiológicas del entorno vaginal. Coadyuvante en los procesos de reepitelización después de un tratamiento físico (DTC, laserterapia, crioterapia), ejerciendo un efecto protector y de barrera.

Posología

Producto de un solo uso. Es suficiente una sola aplicación que podrá repetirse al cabo de 4 días según criterio médico.

Modo de empleo

1. Presione lateralmente hasta eliminar el cierre de seguridad.
2. Introduzca la cánula en el frasco hasta asegurarse que su colocación sea estable.
3. Introduzca la cánula en la vagina, con cuidado, hasta la mitad de su longitud y comprima el frasco hasta que se vacíe completamente.
4. Retenga el líquido en la vagina durante unos minutos para permitir que la solución ejerza su acción.

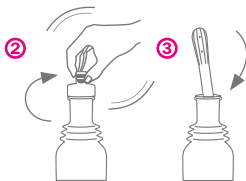

Melagyn®

Solución vaginal

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

Efectos secundarios

Es posible que se pueda producir algún caso de intolerancia (escozor o irritación), pero sin ninguna consecuencia y sin que se requieran modificaciones en el tratamiento. Las pacientes deberán indicar al médico y/o al farmacéutico cualquier efecto no deseado que se sospeche que haya sido causado por el uso de este producto.

Efectos en la conducción o uso de vehículos/maquinaria

No se conocen efectos sobre la capacidad de conducir vehículos, o de usar maquinaria.

Advertencias

Utilice una sola vez y tire el frasco monodosis con el contenido sobrante. El empleo de todos los productos de uso tópico, sobre todo si es prolongado, puede provocar fenómenos de sensibilización; en tal caso, interrumpa el tratamiento y consulte al médico para aplicar la terapia adecuada. El producto deberá administrarse exclusivamente por vía vaginal. En condiciones normales de uso no se conocen daños por sobredosis. Su uso durante el embarazo deberá limitarse a los casos de estricta necesidad y bajo control médico. No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus componentes. No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilice el producto si el envase no está en perfecto estado y completo. Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

Precauciones especiales para su conservación


Conservar a temperatura ambiente protegido de la luz y del calor.

Presentación

Forma farmacéutica: 1 frasco con 100 ml de solución y una cánula vaginal.
Fabricante INGE S.p.a. Via Garibaldi 190, 20024 S. Maria Rossa di Garbagnate Milanese (MILÁN)

CE 0373

Fecha de la última revisión del prospecto: 09/02/2015

 Lo.Li.Pharma S.r.l. - Via dei Luxardo, 33 - 00156 Roma
Distribuido por / Distributed by:
Gynea Laboratorios, S.L.U. Venus 72, Pol. Ind. Colón II,
08228 Terrassa (Barcelona), España


Gynea
laboratorios
www.gynea.com
G1574-02