

BRUDYAL PLUS MULTI es una solución humectante y lubricante ocular, estéril y con un pH fisiológico, a base de hialuronato sódico y agua destilada de aciano azul y manzanilla, en envase multidosis, con capacidad nominal para 10 ml, sin conservantes. El hialuronato sódico ofrece un efecto hidratante y lubricante, que contrarresta la sequedad ocular y crea una película protectora en el epitelio corneal frente a los agentes externos y frente al daño causado por los radicales libres. La manzanilla es conocida en medicina popular por sus propiedades calmantes y refrescantes y, por lo tanto, está indicada para aliviar el dolor y el enrojecimiento de la mucosa ocular causada por agentes atmosféricos y factores ambientales. El aciano azul es conocido por su capacidad hidratante y sus propiedades anti-enrojecimiento. La fórmula también incluye cloruro sódico, tampones fosfato, fosfato sódico dibásico heptahidratado, y fosfato sódico monobásico dihidrato para garantizar una solución fisiológica.

COMPOSICIÓN: Agua destilada de aciano azul, agua destilada de manzanilla, hialuronato sódico, fosfato sódico dibásico heptahidratado, fosfato sódico monobásico dihidrato, cloruro sódico, A.P.I. (agua para inyección). **BRUDYAL PLUS MULTI** es una solución estéril, que no contiene conservantes.

USO PREVISTO: **BRUDYAL PLUS MULTI** está indicado en la sequedad ocular o en las molestias de la mucosa ocular debidas a:

- Factores ambientales (aire acondicionado, radiación solar excesiva, viento, humo, contaminación, natación en agua de mar o en agua de piscina).
- Sequedad ocular debida a la fatiga excesiva tras largas horas de trabajo con ordenador, estudio prolongado, o debido al síndrome de ojo seco.
- Uso excesivo diario de lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Arranque el precinto de seguridad antes de la primera administración.
2. Retire el tapón protector.
3. Presione el envase e instile 2 o 3 gotas en el ojo, tantas veces como lo necesite.
4. El vaciado gradual del envase puede estar asociado a la necesidad de tener que ejercer una presión más elevada que permita el suministro del producto. Ello se debe a las propiedades del sistema de cierre, que actúa para conservar la esterilidad y las características físicas y químicas de las soluciones sin conservantes.

Tras el uso, cerrar el envase: el contenido puede ser utilizado en los próximos 3 meses desde la primera apertura.

Es adecuado para el uso frecuente, de varias veces al día, según las indicaciones específicas del médico consultor.

El producto puede ser utilizado por los usuarios de lentes de contacto, sin necesidad de retirarlas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:


- El producto es exclusivamente para el uso ocular.
- El producto esta destinado para el uso de un solo paciente.
- No utilice el producto si el envase está dañado o no está perfectamente cerrado cuando lo abra por primera vez.
- Durante la aplicación, no toque el ojo ni ninguna otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- No usar en caso de intolerancia conocida hacia cualquiera de los ingredientes.
- No almacenar por encima de 30°C.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
- En caso de efectos secundarios durante el uso, interrumpa el tratamiento y consulte a un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El contenido debe usarse dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

EFFECTOS SECUNDARIOS: No se conocen efectos secundarios indeseables hasta el momento.

CONTENIDO: Envase de 10 ml de solución estéril sin conservantes.

CONDICIONES DE ALMACENAJE: Guardar por debajo de 30°C. El contenido del envase multidosis debe ser utilizado dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

CADUCIDAD: No utilice el producto cuando exceda la fecha de caducidad que figura en la caja y en la etiqueta.

 **COC Farmaceutici s.r.l.** Via Modena, 15. 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo). ITALIA

DISTRIBUIDO POR BRUDYLAB, S.L. Riera de Sant Miquel, 3, 2º 4ª. 08006 Barcelona. ESPAÑA

Texto revisado en: 02.02 de 11/2019



BRUDYLAB®

BRUDYAL PLUS MULTI é uma solução hidratante e lubrificante ocular, estéril e com um pH fisiológico, à base de hialuronato de sódio e água destilada de centáurea azul e camomila, em embalagem multidoso, com capacidade nominal para 10 ml, sem conservantes. O hialuronato de sódio proporciona um efeito hidratante e lubrificante, que neutraliza a secura ocular e cria uma película protetora no epitélio corneal contra os agentes externos e contra os danos causados pelos radicais livres. A camomila é conhecida na medicina popular pelas suas propriedades calmantes e refrescantes e, por isso, é indicada para aliviar a dor e a vermelhidão da mucosa ocular causada por agentes atmosféricos e fatores ambientais. A centáurea azul é conhecida pela sua capacidade hidratante e pelas suas propriedades antivermelhidão. A fórmula também inclui cloreto de sódio, tampões fosfato, fosfato de sódio dibásico hepta-hidratado, e fosfato de sódio monobásico di-hidratado para garantir uma solução fisiológica.

COMPOSIÇÃO: Água destilada de centáurea azul, Água destilada de camomila, Hialuronato de sódio, Fosfato de sódio dibásico hepta-hidratado, Fosfato de sódio monobásico di-hidratado, Cloreto de sódio, A.P.I. (água para injeção). O **BRUDYAL PLUS MULTI** é uma solução estéril que não contém conservantes.

UTILIZAÇÃO PREVISTA: O **BRUDYAL PLUS MULTI** está indicado na secura ocular ou no desconforto da mucosa ocular devidos a:

- Fatores ambientais (ar condicionado, radiação solar excessiva, vento, fumo, poluição, natação na água do mar ou na piscina).
- Secura ocular devido à fadiga excessiva após longas horas de trabalho com computador, ao estudo ou à síndrome do olho seco.
- Uso excessivo diário de lentes de contacto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Retire o selo de segurança antes da primeira administração.
2. Retire a tampa protetora.
3. Pressione o recipiente e instile 2 ou 3 gotas no olho, tantas vezes quantas as que necessitar.
4. O esvaziamento gradual do recipiente pode estar associado à necessidade de ter que exercer uma pressão mais elevada que permita o fornecimento do produto. Isto deve-se às propriedades do sistema de fecho, que atua para conservar a esterilidade e as características físicas e químicas das soluções sem conservantes.

Após a utilização, fechar o recipiente: o conteúdo deve ser utilizado nos 3 meses seguintes à abertura inicial.

O produto é apropriado para uso frequente, várias vezes ao dia, de acordo com as indicações específicas do médico especialista.

Pode ser usado por utilizadores de lentes de contacto, sem necessidade de as retirar.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:


- O produto é exclusivamente para uso ocular.
- O produto destina-se ao uso de um único utilizador.
- Não utilize o produto se o recipiente estiver danificado ou se não estiver perfeitamente fechado quando o abrir pela primeira vez.
- Durante a aplicação, não toque no olho nem em qualquer outra superfície com a ponta do dispensador do recipiente.
- Não usar em caso de intolerância conhecida a qualquer um dos componentes do produto.
- Não conservar acima de 30 °C.
- Não utilize o produto após o prazo de validade indicado na caixa.
- Em caso de efeitos secundários durante a utilização, interrompa o tratamento e consulte um médico.
- Manter fora do alcance das crianças.
- O conteúdo deve ser usado nos 3 meses posteriores à abertura inicial.

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Até agora, não são conhecidos efeitos secundários indesejáveis.

CONTEÚDO: Recipiente de 10 ml de solução estéril sem conservante.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Guardar abaixo de 30 °C. O conteúdo da embalagem multidoso deve ser usado nos 3 meses posteriores à abertura inicial.

VALIDADE: Não utilize o produto após o prazo de validade indicado na caixa e na etiqueta.

 **COC Farmaceutici s.r.l.** Via Modena, 15. 40019 Sant'Agata Bolognese (Bo). ITALY

DISTRIBUÍDO POR BRUDYLAB, S.L. Riera de Sant Miquel, 3, 2º 4ª. 08006 Barcelona. SPAIN

Texto revisto em: 02.02 de 11/2019

