

FitoroiD^{neo}

Trastornos hemorroidales

Alivia el dolor, escozor y prurito,
protegiendo la mucosa

Con Helydol y aceite esencial de **Árbol del té**



PRODUCTO SANITARIO Clase IIb

BIOPOMADA ENDORRECTAL

NeoFitoroid bioPomada es un producto sanitario a base de complejos moleculares vegetales que ejerce una acción **lenitiva y protectora** en la mucosa anorrectal, útil para contrarrestar las molestias (dolor, escozor y prurito), la irritación y la inflamación presentes en caso de hemorroides.

CÓMO ACTÚA

La acción de **NeoFitoroid** se obtiene gracias a **Helydol**, un extracto seco formado por la fracción lipófila purificada de una selección específica de Helicriso que, **enriquecido con Aloe, Rusco, aceites vegetales y esenciales**, calma la irritación, protege la mucosa y favorece la normalización mediante **3 mecanismos de acción:**

- 1. Mucoadhesivo:** se adhiere a la mucosa formando una película con efecto barrera que la protege del contacto con los agentes irritantes;
- 2. Lubrificante:** reduce el rozamiento con las heces, de modo que protege de la irritación y de la congestión perianal;
- 3. Antioxidante:** protege la mucosa de los radicales libres y alivia indirectamente la inflamación.

Además, **NeoFitoroid crea un ambiente desfavorable para el crecimiento de microorganismos**, lo que permite una mayor acción protectora y la reducción del prurito. Sus **propiedades refrescantes** proporcionan un rápido alivio de las molestias. **NeoFitoroid** no contiene corticoides ni anestésicos y, gracias a su mecanismo de acción, no irrita ni seca la mucosa.



Tubo de 40 ml, contiene aplicador endorrectal

INDICACIONES

NeoFitoroid bioPomada está indicado para el tratamiento de las **hemorroides** (internas y externas) **y de los síntomas** asociados, como **dolor, escozor y prurito anal y perianal**. Puede utilizarse **también en presencia de fisuras anales**.

NeoFitoroid bioPomada también puede ser útil para **la prevención y en todas las situaciones** que pueden inducir **irritación y/o congestión** de la zona anal y perianal (estreñimiento, diarrea, alimentación y estilos de vida incorrectos).

NeoFitoroid bioPomada es apto **también para su uso durante el embarazo y la lactancia**.

MODO DE EMPLEO

Para una aplicación externa, extender y realizar un masaje delicado en la zona anal y perianal.

Para una aplicación interna, utilizar la oportuna cánula endorrectal que se enrosca al tubo. Aplicar una cantidad de pomada suficiente para cubrir la parte afectada. Utilizar el producto tras la evacuación y después de un lavado meticuloso y delicado de la zona anal y perianal.

Para obtener un efecto preventivo de la irritación debida a rozamiento, el tratamiento puede efectuarse antes de la evacuación, sin olvidarse de volver a aplicar después el producto.

Después de su uso, desenroscar la cánula, limpiarla detenidamente con agua caliente y jabón y tapar el tubo de la pomada. Puede repetirse la aplicación varias veces al día, incluso al cabo de poco tiempo y durante períodos prolongados.

COMPOSICIÓN

Sustancias funcionales: Extractos secos de sumidades floridas de Helicriso, fracción lipófila (Helydol)* y de raíz de Rusco*; Gel de hojas deshidratado de Aloe vera*; Solución acuosa de sumidades floridas de Helicriso*; Extracto oleoso de sumidades floridas de Hipérico*; Aceite de Jojoba*; Manteca de Karité*; Aceites esenciales de: Árbol del té, Ciprés y Menta piperita.

Contiene además: estearato de glicerilo, triglicérido caprílico/cáprico, diestearato de sacarosa, estearato de sacarosa, alcohol cetosteárico, glicerina vegetal, trihidroxiestearina, aceites vegetales, aceites vegetales hidrogenados, cera de candelilla, goma xantana, ácido cítrico, tocoferoles, sodio silicato, alcohol bencílico, sorbato de potasio, dehidroacetato de sodio, aceite de Girasol.

**Ingrediente de Agricultura Biológica*

No contiene SLS ni SLES, derivados del petróleo, parabenos, PEG, colorantes ni perfumes de síntesis.

ADVERTENCIAS

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. Se recomienda consultar al médico en caso de que los síntomas no mejoren.

Conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado.

CADUCIDAD

Ver la fecha de caducidad indicada en el envase. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada. Se aconseja usar el producto hasta un máximo de 4 meses después de su apertura.

ENVASE EN VENTA

Tubo de 40 ml. Contiene aplicador endorrectal.

Fecha de la última revisión: 06/2015

