


Oroben

- Aftas • Gingivitis
- Pequeñas lesiones

Reduce el dolor, protege
y favorece la curación

GEL ORAL

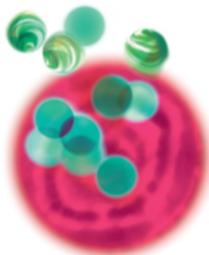

con **Resinox^{FP}**,
complejo molecular natural de
polisacáridos, resinas y flavonoides



PRODUCTO SANITARIO Clase IIa

Oroben Gel oral es un producto sanitario que reduce el dolor y favorece la curación de aftas, estomatitis aftosas recurrentes, encías inflamadas y pequeñas lesiones de la boca debidas, por ejemplo, a tratamientos dentales o al uso de aparatos de ortodoncia y dentaduras postizas.

CÓMO ACTÚA

Oroben Gel oral actúa gracias a **Resinox FP**, un complejo molecular natural fruto de la investigación de Aboca compuesto por polisacáridos, resinas y flavonoides que crean una barrera activa sobre la mucosa de doble acción:

1. PROTECTORA-HIDRATANTE

Forma una película adhesiva sobre la lesión o el área inflamada que limita el contacto con los agentes externos, patógenos o irritantes que contrarrestan el proceso de curación y regeneración tisular natural.

2. ANTIOXIDANTE

Protege la mucosa de la acción irritante de los radicales libres.

Gracias a estos mecanismos, el producto ejerce **una acción antiinflamatoria indirecta** y favorece la reparación tisular reduciendo el tiempo de curación.

Además, el aceite esencial de menta ejerce una acción refrescante dejando una agradable sensación de frescor en la boca.

El tubo de formato pequeño es práctico de usar y permite una aplicación localizada del producto.

INDICACIONES

Coadyuvante específico para el tratamiento de aftas, estomatitis aftosas recurrentes y encías inflamadas. Puede utilizarse, incluso durante períodos prolongados, en caso de pequeñas lesiones de la boca debidas, por ejemplo, a tratamientos dentales o al uso de aparatos de ortodoncia y dentaduras postizas. Apto también para niños mayores de 3 años. Inocuo si se ingiere. No provoca escozor.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una pequeña cantidad de gel directamente en la parte interesada 3, 4 o más veces al día, según necesidad, ayudándose con los dedos limpios o con un bastoncillo de algodón si es necesario. Evitar la ingestión de bebidas o alimentos durante 15 minutos por lo menos a partir de la aplicación para favorecer la adhesión a la parte interesada. Cerrar bien el tubo después de cada aplicación. En caso de encías irritadas, aplicar el producto favoreciendo su adhesión con un suave masaje. Antes de la aplicación de aparatos de ortodoncia o dentaduras postizas, realizar un masaje en la parte interesada.

COMPOSICIÓN

Substancias funcionales: Resinox FP, complejo molecular natural de polisacáridos (de Aloe vera* y Malvavisco*), flavonoides (de Manzanilla*) y resinas (de Mirra).

Contiene además: agua; glicerina vegetal; alginato de sodio; aceite esencial de Menta piperita; xilitol; extracto de Regaliz*; carragenina; glucosa; ácido cítrico; dehidroacetato de sodio; sorbato de potasio; alcohol bencílico.

**Ingrediente de Agricultura Biológica*

No contiene derivados del petróleo, parabenos, PEG, colorantes, perfumes de síntesis ni OGM.

ADVERTENCIAS

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. Conservar en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado. Si los síntomas persisten, consultar al médico para excluir posibles causas sistémicas o de origen dental que requieran otro tipo de tratamientos.

CADUCIDAD

Ver la fecha de caducidad indicada en la caja. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada. Una vez abierto, se recomienda usar el producto en un período máximo de 6 meses.

ENVASE

Tubo de 15 ml. La línea se completa con Oroben Colutorio.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 10/2018.

AFTAS, GINGIVITIS Y PEQUEÑAS LESIONES

La mucosa oral y las encías pueden estar sujetas a estados inflamatorios agudos, a menudo recurrentes o crónicos, como estomatitis, gingivitis y pequeñas lesiones.

La estomatitis aftosa, o más comúnmente afta, es una lesión ulcerativa localizada y de dimensiones variables que afecta a uno o varios puntos de la mucosa en el interior de la cavidad oral. Por lo general estas lesiones son autolimitantes, es decir, tienden espontáneamente a la curación en un plazo de una o dos semanas, pero suelen ser recidivantes y muy dolorosas, a tal punto que pueden causar dificultad para comer, beber o hablar.

Los estados inflamatorios más comunes pueden afectar a las encías y ser consecuencia de una higiene oral incorrecta (acumulación de placa o uso incorrecto del cepillo de dientes y del hilo dental), de tratamientos dentales o del uso de aparatos o dentaduras postizas, cuyo empleo a veces puede causar pequeñas lesiones en las encías u otros puntos de la mucosa en el interior de la cavidad oral.



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Empresa con sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 13485 y sistema de gestión medioambiental ISO 14001 certificados.