

SOLUCIÓN OFTÁLMICA

Protectora y lubricante para adultos y niños
PRODUCTO SANITARIO

OZONest®

OZONEST® es una solución oftálmica protectora, lubricante, hidratante y calmante para la superficie ocular, a base de LipozonEye® (aceite vegetal ozonizado, fosfolípidos de soja) e hipromelosa útil:

- para la protección antes y después de intervenciones quirúrgicas oculares
- para el tratamiento de los síntomas relacionados con patologías de tipo inflamatorio, también de origen infeccioso
- para favorecer los procesos de reparación después de estrés quirúrgico o traumático
- para el tratamiento de la sequedad ocular, incluso en presencia de irritación causada por condiciones ambientales o estrés mecánico, como el uso de lentes de contacto.

OZONEST®, gracias al aceite ozonizado y a los liposomas, reduce la capacidad de las bacterias de formar el biofilm y promueve su disgregación. El biofilm es un mecanismo de defensa natural activado por las bacterias y se puede formar sobre la superficie ocular, especialmente en caso de abrasiones o traumas, o en las lentes de contacto. La eliminación del biofilm crea un ambiente desfavorable para la proliferación de las bacterias y hace que estas queden más expuestas tanto a las defensas naturales del ojo como a los antibióticos, reduciendo así la sintomatología inflamatoria debida a la acción de las mismas bacterias.

La presencia de aceite vegetal y liposomas favorece la estabilización de la capa lipídica de la película lagrimal, reduciendo la evaporación de la capa acuosa y asegurando un alivio inmediato para los ojos.

El aceite vegetal utilizado está ozonizado y, por lo tanto, no contiene conservantes; se vuelve más biodisponible y biotolerable gracias a la integración de los liposomas.

INDICACIONES

OZONEST® está indicado:

- para la profilaxis antes y después de intervenciones quirúrgicas (p. ej. cataratas inyecciones intravítreas, etc.); en particular, se aconseja su aplicación los 3 días previos a la intervención
- en caso de patologías de tipo inflamatorio de la córnea (queratitis) y de la conjuntiva (conjuntivitis), incluyendo también las de origen infeccioso (bacterias, virus, hongos)
- para apoyar el tratamiento antibiótico, tanto en los adultos como en los niños
- en caso de abrasiones, traumas corneales, uso de lentes de contacto

- en caso de alteraciones de la superficie ocular debidas a la inestabilidad de la película lagrimal, presente también en pacientes con infecciones oculares recurrentes.

MODO DE USO

Agitar el frasco antes de su uso.

Instilar una o dos gotas en cada ojo, una o varias veces al día o según la prescripción médica.

El producto puede utilizarse con lentes de contacto aplicadas.

INGREDIENTES

LipozonEye® (aceite de semilla de girasol ozonizado, fosfolípidos de soja) hidroxipropilmetilcelulosa, ácido bórico, tetraborato de sodio, edetato de sodio, PHMB, agua para preparaciones inyectables.

ADVERTENCIAS

- Lavar cuidadosamente las manos antes de utilizar el producto.
- No utilizar el producto en caso de alergia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes.
- Cerrar bien el frasco después de cada uso.
- No utilizar el producto transcurridos 28 días desde su apertura.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el frasco.
- Almacenar el producto a una temperatura entre 8 y 25°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- No ingerir.
- No utilizar el producto si el envase no está en perfecto estado.
- En caso de reacciones adversas, interrumpir el uso del producto y consulte con su médico.
- Asegúrese que la punta del frasco no entre en contacto con el ojo.
- Administrar el producto al menos 5 minutos antes o después de la administración de otros productos oftálmicos tópicos.
- Una ligera variación de la opalescencia de la solución oftálmica no representa una alteración de la calidad del producto.

8 ml

ESTEVE

Distribuido en España por:
Esteve Pharmaceuticals, S. A.
Passeig de la Zona Franca, 109
08038 Barcelona
www.esteve.com

 **FB VISION S.p.A.**

Via San Giovanni Scafa
San Benedetto del Tronto
(AP) – Italy



STERILE A



EX4120-21-01
OZN_MesF000621

Rev. 01/2021