

# Hyabak®

**Este producto es un producto sanitario. Lea las instrucciones de uso antes de utilizarlo.**

**Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.**

## INDICACIONES

HYABAK está indicado para humedecer y lubricar el ojo en caso de sensación de sequedad o fatiga ocular.

HYABAK está también indicado para lubricar las lentes de contacto en caso de incomodidad por su uso. Solo uso ocular.

## APTO PARA

- Adultos,
- Niños: Padres o cuidadores deben administrarles el producto,
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en base al conocimiento actual,
- Usuarios de cualquier tipo de lentes de contacto.

Existen dos referencias diferentes de Hyabak disponibles en todo el mundo. Usted está usando actualmente la referencia T1557 tal y como se indica en la caja. Si compra Hyabak en el extranjero, asegúrese de que esa referencia sea apta para usted. Lea atentamente las contraindicaciones antes de su uso.

## CONTRAINDICACIONES

No inyectar ni ingerir. No usar HYABAK si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes (ver *Descripción del producto*).

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HYABAK es una solución oftálmica compuesta de ácido hialurónico (como hialuronato de sodio 0,15%), cloruro de sodio, trometamol, ácido clorhídrico y agua para preparaciones inyectables.

HYABAK es una solución estéril, sin fosfatos, isotónica y de pH neutro.

La solución se suministra en el envase multidosis ABAK®. Este innovador dispositivo está patentado y proporciona gotas a través de un filtro de 0,2 µm, previniendo cualquier contaminación bacteriana de la solución sin la necesidad de uso de ningún conservante.

Por tanto, HYABAK es suave con los ojos al no contener conservantes. La ausencia de conservantes permite proteger los tejidos oculares y además no produce reacciones en los usuarios que son sensibles a los conservantes

## BENEFICIOS, FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

HYABAK está recomendado para humedecer y lubricar el ojo cuando hay sensación de ojo seco o fatiga ocular inducidos por factores externos tales como el viento, humo, contaminación, polvo, calor seco, aire acondicionado, viajes en avión, trabajo continuado delante de una pantalla de ordenador. Proporciona un alivio inmediato y confort ocular durante el día. HYABAK está recomendado también para usuarios de lentes de contacto. Lubrica e hidrata las lentes, facilitando la colocación o retirada y el uso durante todo el día.

El principal ingrediente de HYABAK es el ácido hialurónico (como hialuronato de sodio), un polisacárido natural que se encuentra en el ojo humano que retiene agua para hidratar y lubricar la superficie del ojo. Mantiene la solución en la superficie ocular proporcionando un alivio duradero y reduciendo el tiempo de curación de la superficie ocular.

## RECOMENDACIONES GENERALES DE USO

No se necesita ningún tipo de formación particular para usar HYABAK.

Lavarse las manos meticulosamente antes de su uso.


No utilizar ninguna herramienta para abrir el envase.

Cuando se utiliza HYABAK por primera vez, la primera gota tarda en salir debido al sistema de filtración único del envase (ver *Descripción del producto*). Cerrar el envase tras su uso.

### Para humectar y lubricar el ojo:

**Dosis:** 1 gota en cada ojo, con la frecuencia que sea necesaria durante el día.

Aplicar una gota en el saco conjuntival, tirando con cuidado del párpado inferior y mirando hacia arriba. Cerrar el ojo suavemente después de la aplicación.

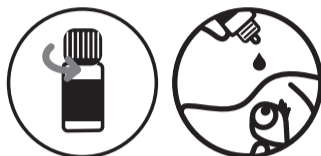

### Para lubricar y hidratar las lentes de contacto:

**Dosis:** 1 gota en cada lente al colocarlas y retirarlas, y también con la frecuencia que sea necesaria durante el día.

Antes de colocarse la lente de contacto, simplemente aplique una gota en el interior de la lente cuando esté en su dedo.

Coloque su lente como realiza habitualmente y parpadee varias veces para permitir que la solución se acomode, asegurando una distribución uniforme de HYABAK en el ojo y en la superficie de las lentes de contacto.



## PRECAUCIONES DE USO

Producto de uso múltiple para un solo paciente.

**No compartir envases entre diferentes personas para evitar contaminación cruzada.**

Comprobar que el embalaje está intacto antes de usar el producto por primera vez.

Comprobar que el precinto del envase está intacto antes de usarlo por primera vez.

Para evitar contaminación, no tocar la punta del envase a cualquier superficie con nada.

Contacte con un profesional sanitario si sus síntomas empeoran o no mejoran.

## ADVERTENCIAS

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Después de su uso, no conducir o usar máquinas si su visión es borrosa: espere unos minutos hasta que su visión sea clara.

Esperar al menos 10 minutos entre la aplicación de dos productos oculares distintos.

Nunca diluir HYABAK o mezclar con otras soluciones.

Tras el primer uso, si se expone a presiones atmosféricas bajas, el envase puede gotear.

## EFFECTOS ADVERSOS

Se han notificado los siguientes efectos adversos: posibilidad rara de irritación ocular leve y enrojecimiento ocular. En tales casos, los usuarios de lentes de contacto deben retirar sus lentes de contacto.

Cuando se usa gotas para los ojos, se puede experimentar síntomas molestos como sensación de ardor, escozor, sensación de cuerpo extraño en el ojo y visión borrosa por un periodo corto de tiempo.

Si experimenta cualquier efecto adverso o sensación inusual tras usar este producto, contacte con un profesional de la salud e informe al distribuidor local, al fabricante o a sus Autoridades Sanitarias locales (ver contactos al final de las instrucciones de uso).

**CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ELIMINACIÓN**

Conservar entre 8°C y 30°C. No exponer el producto directamente a la luz solar ni a la humedad. No utilizar después de la fecha de caducidad claramente indicada en el envase y en el embalaje. La fecha de caducidad corresponde al último día del mes indicado siempre que el embalaje esté intacto y se haya almacenado correctamente. El producto puede utilizarse hasta 3 meses después de su apertura. Transcurrido este tiempo, deseche cualquier resto de producto de forma responsable. Deseche el producto de forma responsable y de acuerdo con la normativa local (el envase debe desecharse como basura doméstica, el embalaje exterior y el prospecto son reciclables).

**Fecha de emisión y versión de las instrucciones de uso: 08/2022 Ver.3**

**Fabricante:**

 Laboratoires Théa  
12 rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand  
Cedex 2 Francia  
[www.laboratoires-thea.com](http://www.laboratoires-thea.com)  
Sección "Contact us" de la página Web

**Distribuidor:**

Laboratorios Thea S.A.  
C/ Enric Granados nº 86-88 2ª planta  
08008 Barcelona – España  
[www.laboratoriossthea.com](http://www.laboratoriossthea.com)  
Sección "Contacto" de la página Web

**Autoridades Sanitarias:**

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022 Madrid  
e-mail: [sgps@aemps.es](mailto:sgps@aemps.es) - <http://www.aemps.gob.es/>

**CE** 0459

**SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS EN EL EMBALAJE**

	Fabricante
	Producto sanitario
	Número de lote
	Consultar las instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Un solo paciente – Múltiples usos
	Fecha de caducidad
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Límites de temperatura
	Precaución
	Esterilizado usando técnicas de procesado asépticas
	Número del catálogo
	No exponer a la luz solar
	Mantener seco
	Identificador único del producto