


Lubristil[®] MULTIDOSIS INTENSE

HIALURONATO SÓDICO
RETICULADO 0,4%

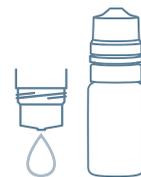

10ml

SIN CONSERVANTES

Lubristil INTENSE es una solución oftálmica estéril a pH fisiológico, basada en una tecnología patentada de reticulación del ácido hialurónico con urea (de manera que se forma una malla entre el ácido hialurónico y la urea). Esta reticulación hace que aumenten y mejoren las propiedades mecánicas específicas del ácido hialurónico, resistiendo a la degradación de las hialuronidasas mucho más tiempo que el ácido hialurónico natural, obteniendo así una acción lubricante e hidratante mayor y más prolongada.

La estructura hidratante en forma de malla del ácido hialurónico reticulado es capaz de suministrar agua durante un período prolongado al mismo tiempo que mejora las propiedades lubricantes del ácido hialurónico natural aumentando sus efectos humectantes, por ello está indicado como un adyuvante en el síndrome del ojo seco.

El ácido hialurónico reticulado proporciona al producto propiedades lubricantes, humectantes y reparadoras, capaces de aliviar la sequedad ocular debida al síndrome del ojo seco, irritación o fatiga ocular en caso de afecciones inflamatorias o factores ambientales, cirugía ocular o cirugía estética de párpados y blefaritis crónica.

La fórmula ha sido desarrollada para asegurar el máximo confort rápidamente tras su aplicación. Es adecuada para el uso diario, de día y de noche. No contiene conservantes y / o moléculas con acciones antiinflamatorias y vasoconstrictoras.

Lubristil INTENSE es compatible con lentes de contacto.

Indicaciones: **Lubristil INTENSE** está indicado

- en el restablecimiento y la mejora de la estabilidad de la película lagrimal en el síndrome del ojo seco;
- después de cirugía refractiva;
- para el alivio de los ojos en casos de enrojecimiento, fatiga y malestar del ojo o de la mucosa ocular debido a:
 - factores ambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, viento, humo, contaminación, agua de mar o agua de la piscina y la salinidad);
 - sequedad de los ojos debido a la fatiga excesiva causada por el trabajo con ordenadores durante largos períodos, el estudio;
 - anomalías lagrimales debidas a inflamación, blefaritis crónica;
 - anomalías lagrimales debidas a cirugía ocular de naturaleza diversa o cirugía estética del párpado;
 - el uso de lentes de contacto blandas o semirígidas.

Composición: Solución acuosa de polímero reticulado de hialuronato sódico (de la cual el polímero reticulado de hialuronato sódico es el 0,4%), trometamol, ácido hidrociorhídrico 2N, cloruro de sodio, agua para inyectables. Sin conservantes.

Instrucciones de uso:

- Lave sus manos cuidadosamente.
- Rompa el precinto de seguridad antes de la primera administración.
- Retire el tapón protector y abra el frasco.
- Gire el frasco boca abajo y presione ligeramente para instilar 2 gotas en cada ojo, a menos que su médico le indique otra cosa.
- Espere unos segundos después de cada gota sin apretar la botella. Esto permitirá que fluya suficiente aire de regreso al sistema de filtro de aire estéril; de lo contrario, será más difícil que las gotas caigan.
- El vaciado gradual del envase puede requerir la necesidad de ejercer una presión mayor para permitir la salida del producto. Esto se debe a las propiedades del sistema de cierre para preservar la esterilidad y las características físicas y químicas de las soluciones sin conservantes. Además, una pequeña cantidad de solución siempre permanece en el envase.
- Sacuda la gota restante de la punta después de su uso.
- Después de su uso, cierre inmediatamente la botella con el tapón.
- No vuelva a colocar el tapón de protección si el recipiente aún está apretado.
- No toque la punta del aplicador con nada, incluidos los ojos o los dedos.
- El contenido debe utilizarse durante los siguientes 90 días desde la primera apertura.

Advertencias y precauciones:

- El producto está destinado únicamente al uso oftálmico.
- El producto es para uso individual.
- No utilizar el producto si el envase está deteriorado o no está perfectamente cerrado en el momento de la primera apertura.
- No usar si hay partículas visibles y/o cambios en el color de la solución.
- Durante la aplicación, evitar tocar el ojo y cualquier otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- En caso de efectos adversos durante el uso, interrumpir el tratamiento y consultar a un médico.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la solución.
- No se han reportado interacciones con medicamentos u otras gotas para los ojos; sin embargo, deje al menos 15 minutos entre administraciones de otras gotas para los ojos.
- Deseche el producto de acuerdo con las normas locales de gestión de residuos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada o es lactante.
- Para uso externo, no tragar.
- No intente manipular o desmontar la boquilla del envase.
- Es necesario informar de cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto sanitario al fabricante y a la Autoridad Competente del Estado miembro en el que esté establecido.

Efectos adversos:

Inmediatamente después de la instilación, el producto puede causar una ligera visión borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Por lo tanto, es recomendable esperar unos segundos antes de cualquier actividad que requiera una visión clara.

Presentación:

El envase está compuesto por un frasco multidosis con sistema de cierre OSD (dispensador oftálmico), con 10 ml de producto sin conservantes.

Condiciones de conservación:

Conservar entre 2°C y 30°C en lugar seco, lejos del calor y de la exposición directa a la luz solar.
Una vez abierto el envase, puede utilizarlo durante los siguientes 90 días.

Caducidad:

Sin abrir: no exceder la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.

Fecha de la última revisión del texto: 02.01.10/2022

CE 0051

MD

STERILE A

DT/01/DT/010

 **C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

 **ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.**

c/ Antonio Machado, 78-80.
3ª planta, módulo A-Edificio Australia
08840 Viladecans, Barcelona (España)
www.lubristil.es

019861



Angelini
Pharma

AF-P/02