

Care+



EYES

Toallitas oftálmicas estériles

Higiene de párpados, pestañas y borde palpebral.

¿Qué es?

Care+ Toallitas oftálmicas estériles están impregnadas de una loción limpiadora para la higiene integral de los párpados, las pestañas y el borde palpebral.

Limpian impurezas, costras y maquillaje presentes en los párpados y la piel sin irritar los ojos ni agredir las capas superiores de la epidermis. Además de su alto poder limpiador, aportan las propiedades hidratantes y regeneradoras del **Aloe Vera**, las propiedades antisépticas de la **Caléndula**, las propiedades calmantes de la **Manzanilla** y las seborreguladoras del **Lirio**.

Care+ Toallitas oftálmicas estériles están formuladas y testadas para presentar unas características con alto poder limpiador y una máxima tolerancia a nivel dermatológico y ocular.

Care+ Toallitas oftálmicas estériles están especialmente indicadas en casos de:


- Higiene diaria de los párpados, pestañas y borde palpebral.
- Higiene antes y después de cualquier procedimiento oftálmico.
- Higiene diaria de pieles sensibles.
- Higiene ocular infantil (bebés y niños).

Ingredientes

Aqua, Aloe Barbadosensis Leaf Juice, Capryloyl Glycine, Poloxamer 184, Propylene Glycol, Sodium Phosphate, Disodium Phosphate, Sodium Hydroxide, Tetrasodium Glutamate, Diacetate, Alcohol, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Iris Florentina Root Extract, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, PPG-5-Ceteth-20, Zinc Sulfate, Retinyl Palmitate.


Modo de empleo

1. Lavar las manos con jabón y aclarar con abundante agua.
2. Abrir el sobre y extraer la toallita impregnada.

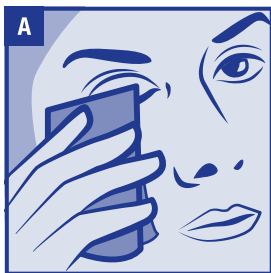

A) Para la higiene de párpados y pestañas:

Con el ojo cerrado, aplicar la toallita sobre el párpado y las pestañas realizando un ligero masaje, mediante movimientos circulares, para desprender y arrastrar los residuos adheridos. Repetir el proceso en el otro ojo usando otra toallita. Utilizar mañana y noche.

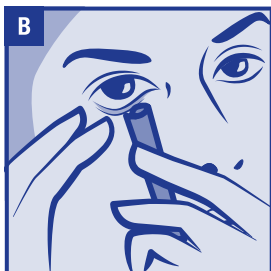

B) Para la higiene del borde palpebral:

Frente a un espejo, fijar el párpado abierto presionando con un dedo sobre las pestañas. Enrollar la toallita en forma de tubo y pasarla suavemente sobre del párpado. Repetir el mismo proceso en el otro ojo usando una nueva toallita. Utilizar mañana y noche.

Contenido del envase

Care+ Toallitas oftálmicas estériles se encuentra disponible en un envase que contiene 30 toallitas estériles unidosis.

Precauciones

No usar en mucosas o heridas abiertas. No usar directamente en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Uso externo.

Care+ Toallitas oftálmicas estériles es un producto fabricado bajo los estándares de calidad de STADA, multinacional farmacéutica alemana especializada en el cuidado de la salud y bienestar.

Distribuido en España por:
Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou 5,
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

