

Solución fisiológica

Higiene diaria ocular y de fosas nasales. Apto para el lavado de heridas.

¿Qué es?

Care+ Solución fisiológica es un suero estéril, sin conservantes y no inyectable. Es higiénico y permite una gran comodidad y seguridad de uso.

Care+ Solución fisiológica puede utilizarse **en lactantes, niños y adultos**:

- Para la higiene ocular: instilación, lavado o baños.
- Para la higiene nasal: instilación o lavado de las fosas nasales secas u obstruidas.
- Para el lavado de heridas.

Composición

Cloruro de Sodio 0,9g y agua purificada c.s.p. 100mL.

Modo de empleo

No utilizar la misma unidosis para varios usos diferentes. El envase unidosis es desechable y para uso individual. Separar una unidosis y abrirla haciendo girar la parte superior. A continuación proceder a la aplicación.

· PARA LA HIGIENE OCULAR Y NASAL

Care+ Solución fisiológica puede utilizarse diariamente para la higiene ocular y nasal, de 1 a 6 lavado(s) al día, en función de las necesidades.

– **Para la higiene ocular:** Instilación, lavado o baños.

Modo de empleo: Poner algunas gotas de solución en cada ojo, evitando que la unidosis entre en contacto con la superficie del ojo. Retirar el excedente de líquido con una compresa.

Precauciones de empleo: En caso de tratamiento con colirio, esperar 15 minutos antes de su instilación.

- **Para la higiene nasal:** Instilación o lavado de las fosas nasales secas u obstruidas.

Modo de empleo: Inclinar la cabeza hacia atrás. Introducir delicadamente el vial en la fosa nasal y presionar ligeramente la unidosis. Repetir la operación en la otra fosa nasal. Volver a bajar la cabeza para dejar que se evacuen las mucosidades y después retirar el excedente. No sonarse violentamente durante 10 minutos después de la administración.

Precauciones de empleo: En los lactantes, instilar el producto con mínima presión a fin de evitar cualquier riesgo de contaminación en el oído medio.

• PARA EL LAVADO DE HERIDAS

Modo de empleo: Limpiar la herida utilizando la totalidad de la dosis y evitando que la unidosis entre en contacto con la herida.

Precauciones de empleo: Retirar el excedente de líquido únicamente sobre la piel sana.


Conservación

No utilizar la unidosis si está abierta o dañada, debido al riesgo de rápida contaminación bacteriana. No supere la fecha límite de utilización indicada sobre el envase unidosis.

Precauciones

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Distribuido en España por:
Laboratorio STADA, S.L.,
Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

 Fabricado por:
LDPSA
28, Rue Marbeuf
75008 Paris
FRANCIA


STADA

 No inyectable

 0459
Año: 2010


STERILE A



IG 246293 - 10/16