



Aquoral FORTE

GOTAS OFTÁLMICAS LUBRICANTES

Ácido hialurónico 0,4% y Galacto-xiloglucano 0,2%

30 monodosis con cierre de 0,5 ml sin conservantes y sin fosfatos, en 6 sobres de 5 unidades

Composición:

Ácido hialurónico (0,4% p/v), Galacto-xiloglucano (0,2% p/v), manitol, citrato de sodio, ácido cítrico monohidrato, agua para preparaciones inyectables.

¿Qué es?

Aquoral Forte es una solución oftálmica humectante y lubricante, sin conservantes y sin fosfatos, que contiene sustancias con acción protectora: ácido hialurónico (0,4% p/v), lubricante y mucomimético; y Galacto-xiloglucano (0,2% p/v), con funciones de equilibrio y protección.

¿Cómo se presenta?

Aquoral Forte se presenta como una solución de gotas oftálmicas en 30 monodosis con cierre para uso diario.

¿Cuándo debe usarse?

Aquoral Forte lubrica y protege la superficie ocular, proporcionando un alivio prolongado.

Aquoral Forte es una solución oftálmica con Galacto-xiloglucano y con ácido hialurónico de alto peso molecular, obtenido por síntesis biotecnológica.

El ácido hialurónico es una sustancia con efecto mucomimético, con propiedades lubricantes óptimas por la viscosidad de dicha solución y cuyo resultado es un eficaz efecto hidratante y estabilizador de la película lagrimal.

El Galacto-xiloglucano es una sustancia natural extraída de la semilla del tamarindo (*Tamarindus indica*), muy útil en la protección de la superficie corneconjuntival. El Galacto-xiloglucano forma una capa protectora en la superficie ocular que permite recuperar el equilibrio fisiológico de la película lagrimal y de la superficie ocular.

La combinación de ambas sustancias genera una acción sinérgica en la superficie corneconjuntival que la protege de la irritación por factores ambientales (viento, sol, humo, aire seco), estrés visual (exposición excesiva a la luz, uso excesivo de ordenadores) o factores mecánicos (uso de lentes de contacto, tras una cirugía ocular).


La concentración de esta combinación se potencia de tal manera que garantiza la lubricación incluso en los casos de molestias más intensas.

El producto no contiene conservantes y es adecuado para su uso con lentes de contacto.


Posología:

1 gota en el ojo una o más veces cada día, según necesidad.

Modo de empleo:

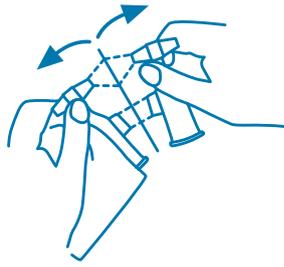


1. Separar para utilizar la monodosis.

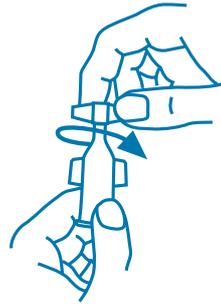

2. Romper la cubierta girándola por la ranura.



3. Instilar 1 gota en cada ojo.

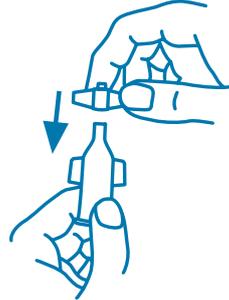

4. Tapar la monodosis para un 2º uso. Puede usar la misma máximo hasta 12 horas después de su apertura.

Precauciones y advertencias:

- Este producto es exclusivamente para uso oftálmico externo.
- Cada monodosis puede utilizarse hasta 12 horas después de su apertura.
- No utilizar si el envase está dañado.
- No utilizar en caso de sensibilidad a cualquiera de sus componentes.
- No utilizar tras la fecha de caducidad indicada en el producto.
- No tocar el ojo con la punta del envase.
- Tras su administración, puede observarse en raras ocasiones visión borrosa transitoria a causa de la viscosidad de la solución. Por lo tanto, es aconsejable esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera agudeza visual.
- Dejar al menos 10-15 minutos antes de administrar otro fármaco oftálmico.
- Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Conservar a menos de 25 °C.
- No ingerir.

Distribuido en España por: Esteve Pharmaceuticals, S.A.

Passeig de la Zona Franca, 109
08038 Barcelona, España
www.esteve.com

Fabricante: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

Fecha de la última revisión del texto: Junio 2018



STERILE A



Desechado de forma adecuada después de su uso

ESTEVE

EX3644-18-01